

Même le rhume n'est plus un problème

Inhalez dès les premiers signes d'un rhume. Vous obtiendrez un meilleur résultat en utilisant de la vapeur claire la plus chaude possible, car les virus ne peuvent survivre à des températures dépassant 40° C.

Inhalez donc avec la chaleur plus élevée possible et par le nez !

Pour combattre les virus du rhume – même au stade initial - il est important d'inhaler 3 fois environ toutes les 2 heures pendant à peu près 20 minutes.

Inhaler avec des produits d'additions

L'effet principal de l'inhalateur bronchi-soft se base sur la vapeur chaude claire.

Le moyen d'inhalation le plus naturel et évident est l'eau claire. Cependant on peut également utiliser des infusions, du 'produit élué de marais' ainsi que plusieurs autres moyens naturels.

Utilisez les produits d'additions avec modération ! L'addition de médicaments n'est PAS nécessaire pour libérer les muqueuses.

Les médicaments évaporables peuvent être inhalés suivant les prescriptions de votre médecin.


Mesurez la quantité prévue du médicament prescrit avec le gobelet gradué et ajoutez de l'eau de robinet jusqu'à rejoindre 30 ml. (n'utilisez pas de solutions huileuses, telles que pommades, crèmes, etc.)

bronchi soft®

Inhalateur à vapeur claire

Le nettoyage efficace et délicat de toutes les voies respiratoires

C'est bien que vous fassiez partie des personnes qui prennent leur santé au sérieux. Donc, nos meilleurs félicitations pour avoir choisi l'inhalateur à vapeur claire bronchi-soft. Vous possédez un appareil novateur qui utilise un principe d'inhalation tout à fait nouveau, à savoir l'inhalateur à

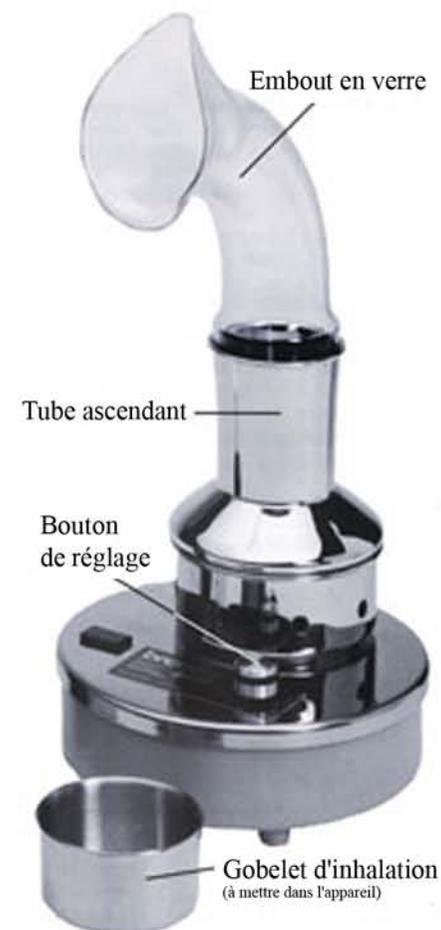

La vapeur claire est une micro-nébulisation invisible, ayant la température du corps; l'humidité inhalée par la vapeur claire est 1000 fois plus fine que celle des inhalateurs communs.

Afin d'avoir un bon résultat et du plaisir avec votre inhalateur à vapeur claire bronchi-soft, veuillez suivre soigneusement ce

mode d'emploi

Pour inhaler, versez 30 ml de liquide dans le gobelet d'inhalation en utilisant le gobelet gradué. Placez le gobelet d'inhalation sur la plaque chauffante de l'appareil. Utilisez à cet effet de l'eau du robinet ou de l'eau minérale (l'eau distillée n'est pas nécessaire)

Les produits d'inhalation ou les médicaments naturels seront mélangés avec de l'eau. 30 ml de ce mélange suffisent pour environ 30 minutes d'inhalation.

Pour contrôler l'ébullition, ajoutez à chaque inhalation 5 perles facilitant l'ébullition du liquide d'inhalation. Ces perles peuvent être toujours réutilisées – il suffit de les rincer brièvement.

Placez le tube ascendant et le tube de respiration en verre sur l'appareil, branchez celui-ci à une prise de terre (220 V) et allumez-le. Placez le bouton de réglage sur la position 9. (le témoin vert ne s'allume qu'à partir de la position 4).

Après environ 4 minutes, une condensation se forme à l'intérieur du tube de respiration en verre. Tournez alors le bouton de réglage en position 5 ou 6. A ce moment vous pouvez commencer à inhaler.

Le tube de respiration en verre doit d'adapter sans serrer au nez et à la bouche. Si possible, inspirez et expirez par le nez sans faire d'effort. Si le nez est bouché, on peut également respirer par la bouche.

Retenez l'air inspiré pendant environ 2 secondes et expirez dans l'appareil. En général la position 6 est ressentie comme bénéfique et apporte suffisamment de vapeur claire. La température peut être corrigée pendant l'inhalation.

Une petite quantité de liquide résiduel devrait toujours rester au terme de l'inhalation.

Après l'inhalation mettez le bouton de réglage en position 0 (il faut surmonter une légère résistance entre 1 et 0) et débranchez le câble de la prise. En raison de son type de construction massive, l'appareil nécessite de quelque temps pour refroidir.

Nettoyage et soins

Nettoyez l'Inhalateur refroidi exclusivement à sec (autour de la plaque chauffante). Le tube ascendant, le tube de respiration en verre et le gobelet d'inhalation doivent être nettoyés à l'eau chaude en utilisant un détergent doux. Utilisez du vinaigre pour enlever les taches tenaces.

Si certaines conditions particulières d'utilisation de l'appareil exigent une stérilisation, vous pouvez même faire bouillir le tube de respiration en verre.

Quand et combien de temps faut-il inhaler?

Habituez-vous à l'appareil en inhalant d'abord pendant 10 à 15 minutes. Augmentez la durée de l'inhalation à 30 minutes 2-3 fois par jour. Des inhalations longues et fréquentes ne présentent aucun risque.

Après chaque maladie continuez à inhaler pendant quelque temps, afin de protéger les muqueuses encore fragiles et fortifier ainsi vos défenses immunitaires.

Notre recommandation: faites de temps en temps une cure d'inhalation pour prévenir les maladies par refroidissement et nettoyer les muqueuses de l'ensemble des voies respiratoires.